

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 平素は格別なご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。  
 このたび、下記の検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂くことになりましたのでご案内を致します。  
 何卒ご理解ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 記

- 変更実施日：2022年4月1日（金）以降、旧採取容器から新採取容器へ変更された時点より、検査方法を変更致します。
- 変更内容：検査方法及び基準値等の変更

コード	検査項目名	新			旧		
		検査方法	基準値	所要 日数	検査方法	基準値	所要 日数
3023	透析液 イントキシ	比濁時間 分析法	0.001 未満 EU/mL	1~3	比色法	0.001 未満 EU/mL	3~5
	採取容器  T4 (冷蔵)	 <透析液採取管ワコー>			 <HDチューブ>		

#### 【新採取容器の使用方法】

- (1)注射針をつけたシリンジを用いて透析液5mLを採取します
- (2)透析液採取管ワコーのキャップを外し、透析液を採取したシリンジの注射針をゴム栓に刺します
- (3)全量（5mL）を注入します
- (4)透析液採取管内の空気（約5mL）をシリンジ内に戻します
- (5)注射針を抜き取り、数回攪拌してよく混和します

※検体用ラベルは付いておりませんので、名前・番号等は、容器へ直接記入もしくは手書きラベルの貼付をお願い致します

お問い合わせ  
 株式会社CIS熊本中央研究所  
 TEL(096)284-1381