

専用容器一覧

B - 1 生化学検査用 (真空採血管)  真空採血量 9ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 材料が血清の項目	B - 2 血液学検査用 (真空採血管)  真空採血量 2ml 添加剤 EDTA-2K 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 末梢血液一般検査 陰圧がなくなるまで、 充分に真空採血。 採取後、軽く転倒混和。	B - 3 血糖検査用 (真空採血管)  真空採血量 2ml 添加剤 フッ化 Na 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 グルコース (血糖) 陰圧がなくなるまで、 充分に真空採血。 採取後、軽く転倒混和。	B - 4 血液凝固検査用 (真空採血管)  真空採血量 1.8ml 添加剤 3.2% クエン酸 Na 0.2ml 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 PT、APTT、FDP 陰圧がなくなるまで、 充分に真空採血。 採取後、軽く転倒混和。
B - 1 B - 6 分離不可用10 (真空採血管) 分離不可用 5 (真空採血管)  真空採血量 9ml 5ml 添加剤 CPD 液 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 不規則性抗体 クームス試験	B - 7 血中アンモニア 専用管  採血量 1ml 添加剤 除蛋白液 4ml 保管方法 冷蔵 有効期間 容器表示 主な検査項目 血中アンモニア 採血後直ちに血液 1.0ml を 正確に入れ転倒混和後、 遠心分離し上清を分注して 密栓した上で凍結保存	U - 1 尿・穿刺液用管  容量 10ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 主な検査項目 尿検査 穿刺液検査	U - 2 糞便一般用  採取量 拇指頭大 添加剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 糞便検査 寄生虫検査
U - 4 便中ヘモグロビン用  採取量 適当量 添加剤 保存液 保管方法 室温 有効期間 容器表示 主な検査項目 便中ヘモグロビン (定性) 便中ヘモグロビン (定量)		S - 1 滅菌喀痰容器  採取量 1～2ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 主な検査項目 細菌学的検査 ・好気性菌検査に適応 ・真菌検査に適応 ・抗酸菌検査に適応	S - 2 キャリブレア入り 便容器  採取量 1～2 g 添加剤 キャリブレア培地 保管方法 室温 有効期間 6ヶ月 主な検査項目 細菌学的検査 ※消化器感染症原因菌 全般 (嫌気性菌を除く)。
S - 3 カルチャースワブ プラス  採取量 充分量 培地 改良アミーズ培地 保管方法 室温 有効期間 容器表示 主な検査項目 細菌学的検査 ・好気性菌検査に適応 ・抗酸菌検査に適応 ・ふきとり検査等に適応	S - 4 カルチャースワブ プラスミニチップ  採取量 充分量 培地 改良アミーズ培地 保管方法 室温 有効期間 容器表示 主な検査項目 細菌学的検査 ・好気性菌検査に適応 ・真菌検査に適応 ・抗酸菌検査に適応	S - 5 嫌気ポーター  嫌気ポーターに半分以上 培地 レザズリン入寒天 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 細菌学的検査 ・好気性菌検査に適応 ・嫌気性菌検査に適応 ・真菌検査に適応	S - 6 カルチャーボトル  採取量 8～10ml 培地 保管方法 室温 / 遮光 有効期間 容器表示 主な検査項目 細菌学的検査 ・好気性菌培養 (青) ・嫌気性菌培養 (赤)

専用容器一覧

A EDTA-2Na 入り (真空採血管) 	C EDTA-2Na 入り (真空採血管) 	D EDTA-2Na+ アプロチニン (真空採血管) 	PN7 EDTA-2Na 入り (真空採血管) 
真空採血量 7ml	真空採血量 2ml、5ml	真空採血量 3ml	真空採血量 2ml、7ml
添加剤 EDTA-2Na	添加剤 EDTA-2Na	添加剤 EDTA-2Na + アプロチニン	添加剤 EDTA-2Na
保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法 室温
有効期間 2年	有効期間 2年	有効期間 1年	有効期間 2年
主な検査項目 カテコールアミン(3分画) VMA HVA	主な検査項目 レニン活性 アミノ酸分析 Whole PTH	主な検査項目 ANP (ヒト心房性ナトリウム 利尿ペプチド)、グルカゴン PTHrP	主な検査項目 HTLV-1 核酸検出 (妊婦)
e アルミニウム (真空採血管) 	G ヘパリン入り (真空採血管) 	g1 EDTA-2K 入り (真空採血管) 	G3 ヘパリン入り (真空採血管) 
真空採血量 2.0 ~ 3.0ml	真空採血量 5ml	真空採血量 2ml	真空採血量 4ml
添加剤 凝固促進剤	添加剤 ヘパリン Na	添加剤 EDTA-2K 入り	添加剤 ヘパリン Na
保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法 室温
有効期間 1年	有効期間 2年	有効期間 1年	有効期間 18ヵ月
主な検査項目 アルミニウム (A)	主な検査項目 IgG-FcR+.T 細胞百分率	主な検査項目 ビタミン B1 ビタミン B2 → (遮光 ポリスビツ)	主な検査項目 コプロポルフィリン (遮光)
I ヘパリン入り (真空採血管) 	L2 結石専用容器 	R NK 細胞活性 (真空採血管) 	r3 乳酸、ビルビン酸 
真空採血量 10ml	検体量 結石 10mg	真空採血量 5ml	採血量 1.0ml
添加剤 ヘパリン Na	添加剤	添加剤 保存液 0.7ml	添加剤 除蛋白液 1ml
保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法	保管方法 冷蔵
有効期間 2年	有効期間	有効期間 1年	有効期間 1年
主な検査項目 DLST (薬剤によるリン パ球刺激試験)	主な検査項目 結石分析 (成分比率)	主な検査項目 NK 細胞活性	主な検査項目 乳酸 ビルビン酸
r5 ビタミンC (アスコルビン酸) 	W1 ヘルペス抗原容器 	W5 癌胎児性フィブロネチン容器 	W6 顆粒球エラスターゼ容器 
血清添加量 0.5ml	検体量 (検体の塗抹)	検体量 (適量)	検体量 (適量)
添加剤 除蛋白液 0.5 ml	添加剤	添加剤 抽出液	添加剤 抽出液
保管方法 冷蔵	保管方法 室温	保管方法 室温	保管方法 室温
有効期間 1年	有効期間 1年	有効期間 1年	有効期間 1年
主な検査項目 ビタミンC (アスコルビン酸) (遮光)	主な検査項目 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗原 単純ヘルペスウイルス特異抗原	主な検査項目 頸管腔分泌液中 癌胎児性フィブロネチン	主な検査項目 子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ

専用容器一覧

Y5 尿中ミオグロビン用容器  採取量 6ml 添加剤 保存剤 保管方法 室温 有効期間 2年 主な検査項目 尿中ミオグロビン	Y5 尿中ミオグロビン用容器  採取量 6ml 添加剤 保存剤 保管方法 室温 有効期間 2年 主な検査項目 尿中ミオグロビン	Y8 NMP22 容器  採取量 5ml 添加剤 保存液 保管方法 室温 / 遮光 有効期間 2年6ヵ月 主な検査項目 尿中核マトリックス プロテイン 22 (NMP22)	Z 金属検査用容器  容量 10ml 添加剤 (酸洗浄済み) 保管方法 室温 有効期間 主な検査項目 銅 (血清分注用) 亜鉛 (血清分注用)
i (S/P) 遮光ポリスピッツ  容量 10ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 主な検査項目 遮光用検体	B-12 尿中 FDP 用容器  採取量 1ml 添加剤 トロンビン用酵素 保管方法 室温 有効期間 1年6ヵ月 主な検査項目 尿中 FDP	B-16 PF-4、 β -TG 用容器  真空採血量 4.5ml 添加剤 CTAD 溶剤 保管方法 / 遮光 有効期間 2年6ヵ月 主な検査項目 PF-4 β-TG	
B-18 細胞性免疫・染色体検査用容器  真空採血量 10ml 添加剤 ヘパリン Na 保管方法 室温 有効期間 2年 主な検査項目 T-SOT.TB (結核菌 FN-γ測定) 染色体検査 クオニフェロン	B-19 遺伝子診断検査 (血液用)  真空採血量 6ml 添加剤 EDTA2K 保管方法 室温 有効期間 510 日 主な検査項目 移植関連検査 HTLV-1 プロウイルス DNA	B-20 遺伝子診断細胞凍結サンプル用  容量 15ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 5年 主な検査項目 マイコプラズマ核酸検出/LAMP (喀痰)	B-26 ウイルス遺伝子検査用 (血漿)  真空採血量 8ml 添加剤 EDTA2K、血漿分離剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 HIV-1 RNA 定量 (リアルタイム PCR 法) ※検体を遠心分離後、 冷蔵にて提出ください。
B-28 ウイルス遺伝子検査用 (血清)  真空採血量 5ml 添加剤 凝固促進剤、血清分離剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 HBV-DNA 定量 (リアルタイム PCR 法) HCV-RNA 定量 (リアルタイム PCR 法) ※検体を遠心分離後、暫くの間 (30 分程度) 冷蔵保管し、その 後凍結にて提出ください。	B-32 遺伝子一般 (血清)  真空採血量 3ml 添加剤 凝固促進剤、血清分離剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 HBV-DNA 定量 (TMA 法) HCV-RNA ジェノタイプ ※検体を遠心分離し、血清の分 離を確認後、容器をそのまま凍 結にて提出ください。	B-29 血小板表面 IgG 用  真空採血量 8.5ml 添加剤 ACD 液 1.5ml 保管方法 室温 有効期間 720 日 主な検査項目 血小板表面 IgG LDL-R 活性	HIV HIV 専用  真空採血量 8.5ml 添加剤 凝固促進剤、血清分離剤 保管方法 室温 有効期間 365 日 主な検査項目 HIV-1 抗体 / WB 法 HIV-2 抗体 / WB 法

専用容器一覧

HPV-1 HPV 容器 (一般用) 	検体 患部擦過物 添加剤 保存液 保管方法 室温 有効期間 3年 主な検査項目 HPV-DNA (高リスク型) (低リスク型)
HPV-2 HPV 容器 (妊婦用) 	検体 患部擦過物 添加剤 保存液 保管方法 室温 有効期間 3年 主な検査項目 HPV-DNA (高リスク型) (低リスク型)
F-8 糞便中ヘリコバクタ ピロリ抗原検査 	検体 糞便 添加剤 安定化剤 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 便中ヘリコバクタ・ ピロリ抗原
UBT-O 呼気採取バック 	検体 呼気 200 ~ 250ml 添加剤 保管方法 室温 有効期間 主な検査項目 尿素呼気試験
X-2 染色体検査骨髓液用 細胞性免疫検査骨髓液用 	検体 骨髓液 添加剤 保存液 保管方法 冷凍 有効期間 1年 主な検査項目 染色体検査 (骨髓液) ※検体採取後は冷蔵で ご提出ください。
O-83 クラミジア・トラコマ チス抗原 (IDEIA) 用 	検体 患部擦過物 添加剤 保存液 (ぬぐい液用) 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 クラミジア・トラコマ チス抗原 / IDEIA 男性用 女性用
QS 淋菌 / クラミジア (PCR法) (分泌物) 	検体 分泌物 添加剤 保存液 4.3ml 保管方法 室温 有効期間 表記どおり 主な検査項目 淋菌 PCR 分泌物 クラミジアトラコマチス PCR 分泌物
QU・QUG 淋菌 / クラミジア (PCR法) (尿及び、うがい液) 	検体 尿及び、うがい液 添加剤 保存液 4.3ml 保管方法 室温 有効期間 表記どおり 主な検査項目 淋菌 PCR 分泌物 クラミジアトラコマチス PCR 分泌物
YM 喀痰採取用 (蓄痰用) 	検体 喀痰 添加剤 保存液 保管方法 室温 有効期間 1年 6ヵ月 主な検査項目 細胞診 (蓄痰法)
LBC シンプレップ バイアル 	検体 婦人科液状化検体細胞診 添加剤 保存液 保管方法 室温 有効期間 2年 主な検査項目 婦人科 LBC HPV-DNA (高リスク型) HPV-DNA (型判定)
T3 (B-25) エンドトキシン (血液用) (1→3) ベータ-D-グルカン 	真空採血量 2ml 添加剤 ヘパリン Na 保管方法 室温 有効期間 1年 主な検査項目 エンドトキシン定量 (血液) (1→3) ベータ-D-グルカン
T4 エンドトキシン (透析液用) 	採取量 4ml 添加剤 安定化剤入り 保管方法 冷蔵 有効期間 1年 主な検査項目 エンドトキシン透析液
QFT 結核菌 FN- γ 測定 	真空採血量 6mL 添加剤 ヘパリンリチウム 保管方法 4 ~ 25℃ 有効期間 1年 3ヵ月 主な検査項目 結核菌 FN- γ 測定 クオンティフェロン
07 分離不可 免疫抑制剤用容器 	真空採血量 5ml 添加剤 EDTA-2Na 保管方法 室温 有効期間 2年 主な検査項目 シクロスポリン
V-P スプー核酸 PCR 用 	咽頭拭い液 添加剤 保存液入り 保管方法 室温 有効期限 表記 主な検査項目 ウイルス 核酸同定・定量 PCR 法

専用容器一覧

PA 病理組織検査用		T プレパラート	
	検体 病理組織		
	添加剤 15%ホルマリン溶液 に検体(組織を入れて ご提出ください。		添加剤
	保管方法 室温 有効期間		保管方法 室温 有効期間
	主な検査項目 病理組織検査		主な検査項目 細胞診塗抹標本